



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОБ МОЧИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 100 мл



1 — крышка со встроенным держателем пробирки

2 — стакан

3 — игла для прокола пробки

4 — защитная наклейка

Производитель:

ООО «Эрмайнс», Россия, РТ, г. Казань

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4856 от 11.10.2016

Назначение:

Контейнер предназначен для сбора, хранения и транспортирования проб мочи, а также удобного и безопасного отбора мочи в вакуумную пробирку.

Область применения:

Клиническая лабораторная диагностика.

Описание изделия:

Изделие нестерильное одноразового применения, состоящее из:

- **крышки**, обеспечивающей герметичность контейнера, со встроенным держателем вакуумной пробирки, позволяющим быстро и удобно перенести образец из контейнера в пробирку;
- **стакана** из прозрачного пластика с градуировочными линиями, и матовой панелью для нанесения идентификационных данных;
- **иглы**, предназначенной для прокола пробки вакуумной пробирки;
- **защитной наклейки** для предотвращения случайного контакта с иглой

ВНИМАНИЕ!

Контейнер изготовлен из медицинского сертифицированного высококачественного сырья российского производства

Меры предосторожности:

- при работе следует соблюдать меры предосторожности (не ронять, не бросать контейнер во избежание поломок, повреждений, механических разрушений поверхностей);
- перед использованием проверить целостность индивидуальной упаковки;
- не использовать повреждённый контейнер;
- после использования вернуть защитную наклейку;
- использованный контейнер утилизировать в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении

Условия хранения:

от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C.

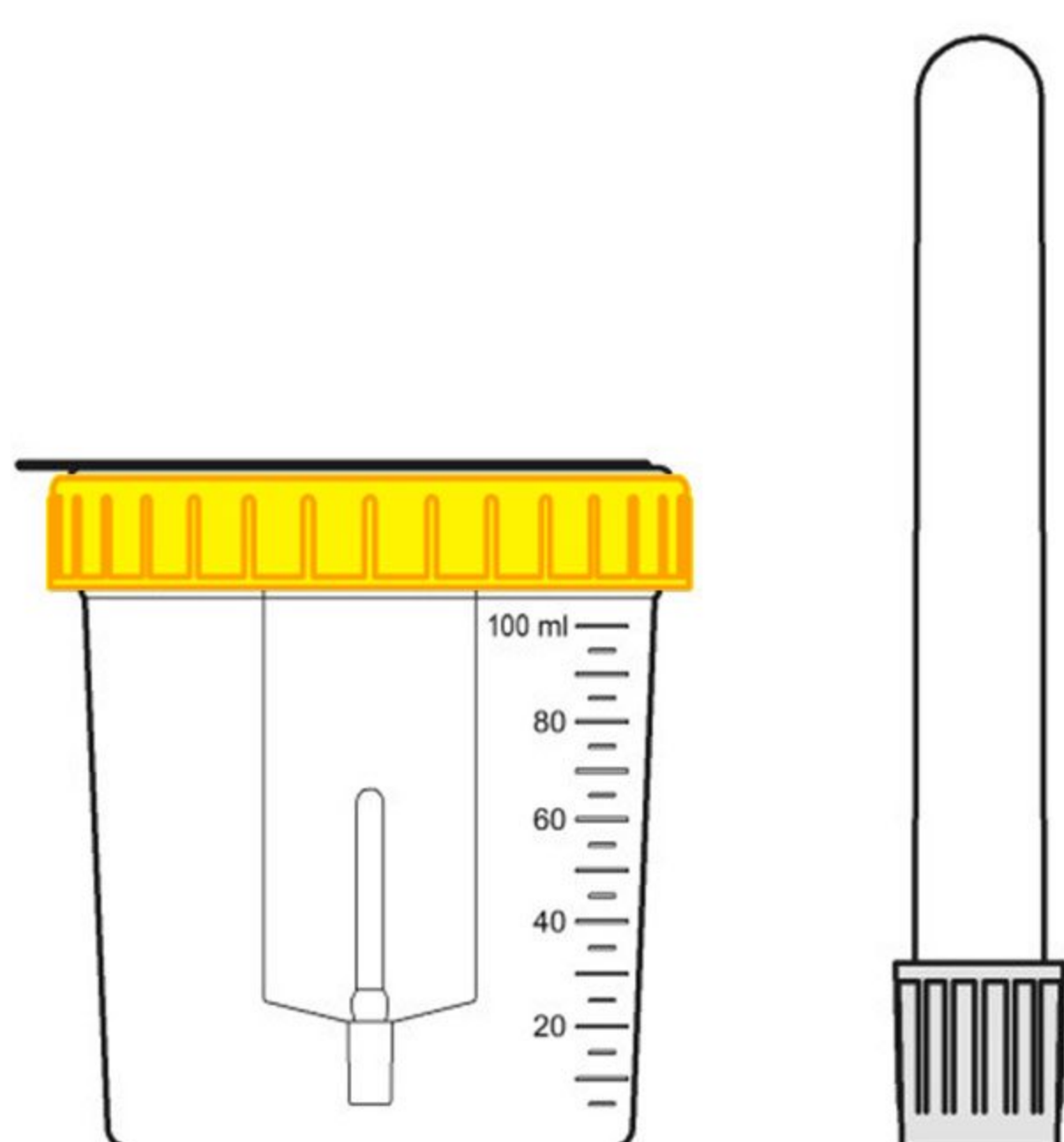
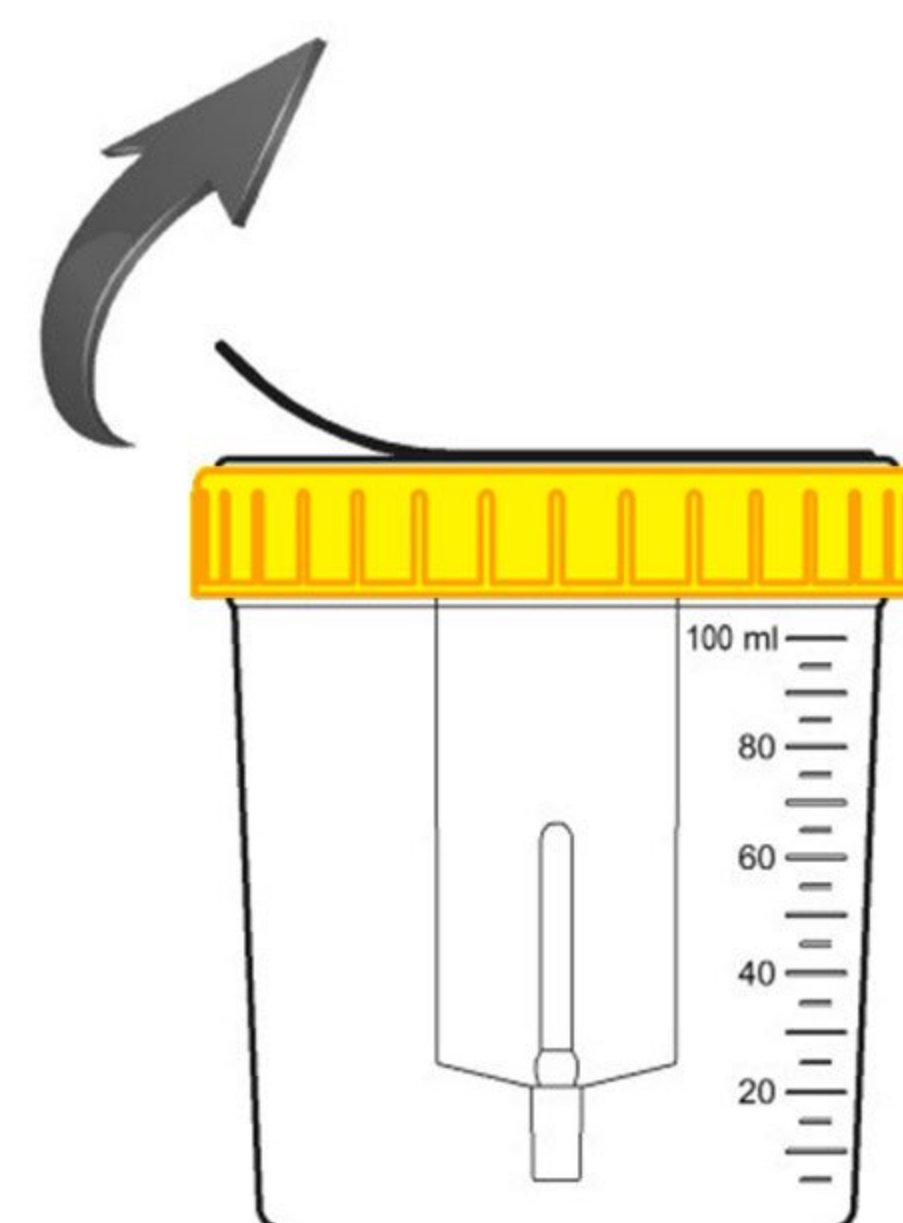
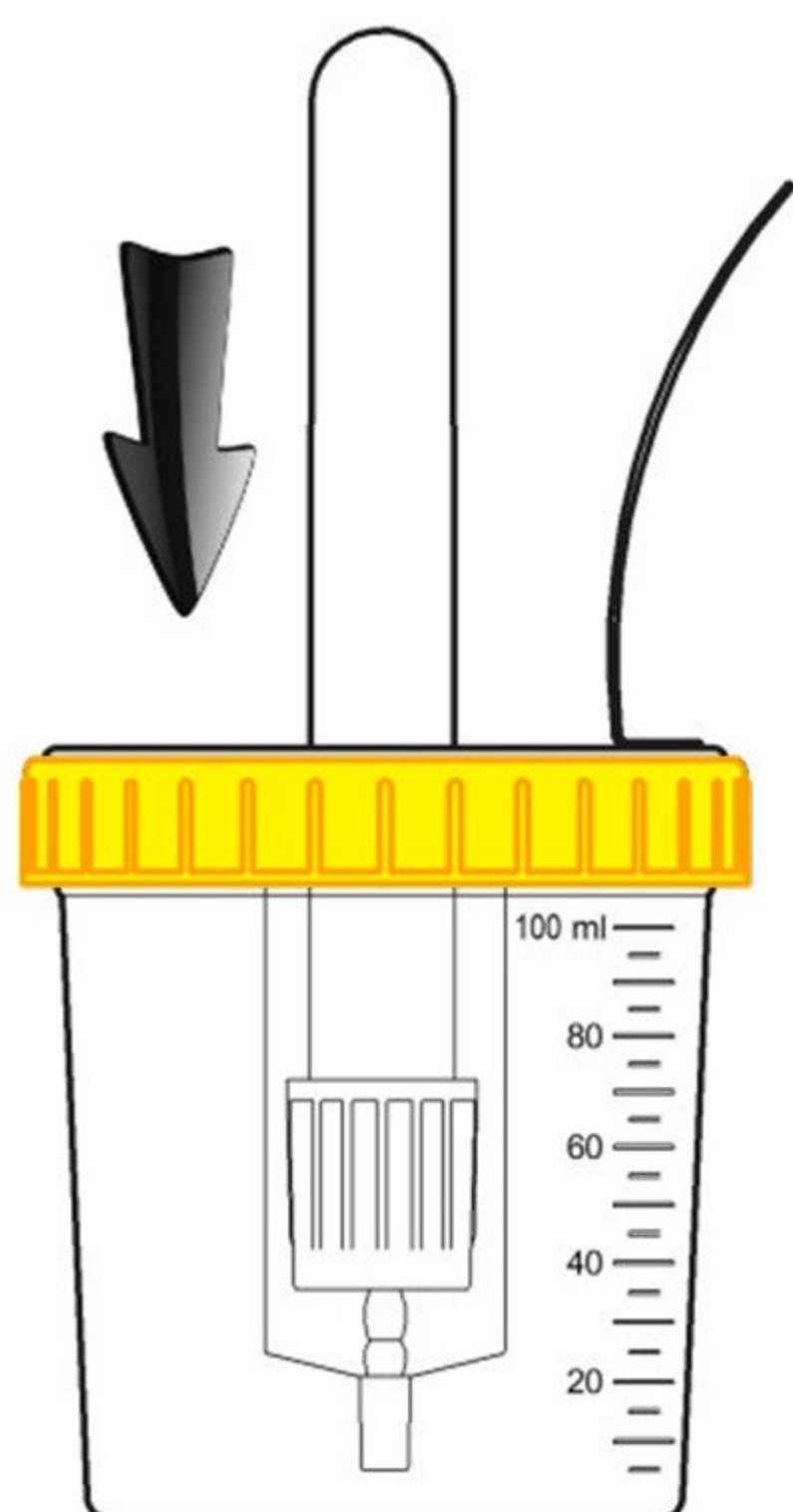
Срок годности:

пять лет с даты изготовления

Упаковка:

индивидуальная потребительская

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1 Шаг**2 Шаг****3 Шаг****4 Шаг**